

# Feelware Audio Nachrüstung für Herde und Backöfen



- **Barrierefreie Bedienung von Herd und Backofen durch Sprachansagen**
- **Einfach nachrüstbar an vielen Modellen**
- **Ansage der Geräteeinstellungen durch Drehen der Bedienknöpfe**
- **Gelistet im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverband**

## Wir bringen Ihrem Herd bei, mit Ihnen zu sprechen

Sie kochen gerne, aber die Bedienung des Gerätes gelingt nicht mehr, weil Sie die Beschriftungen auf dem Gerät nicht sehen? Sie haben vor kurzem ein neues Haushaltsgerät angeschafft und kommen mit der Bedienung nicht zurecht, weil Sie die Einstellungen nicht erkennen können?

Mit der Feelware Audio Nachrüstung passen wir Herde und Backöfen an die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen an. Wenn ein Herd mit dem Hilfsmittel ausgerüstet ist, sagt er die Einstellungen der Drehknöpfe an, sobald sie geändert werden. Um die aktuelle Einstellung eines Drehknopfes nochmal ansagen zu lassen, tippen Sie kurz an den Knopf. So sind Sie beim Kochen und Backen jederzeit bestens informiert und können das Gerät sicher bedienen und ausschalten.

## Einfache Nachrüstung

Die Sprachausgabe besteht aus intelligenten Drehknöpfen, die an Stelle der originalen Knöpfe an Ihrem Herd montiert werden. Das ist ganz einfach, denn die Knöpfe werden nur am Herd angesteckt. Dazu benötigt man kein Werkzeug und die Umrüstung ist innerhalb weniger Minuten erledigt. Sobald die Feelware Drehknöpfe an dem Herd angebracht sind, erfassen Sie die Einstellung und senden sie per Funk an die mitgelieferte AudioBox. Die AudioBox hat einen Lautsprecher und sagt die Einstellungen an.

## Ist Ihr Herd oder Backofen nachrüstbar?

Die Feelware Audio Nachrüstung ist sehr flexibel einsetzbar und passt an viele Herde und Backöfen. Folgende Eigenschaften muss ein Gerät erfüllen, um mit der Sprachausgabe ausgerüstet werden zu können:

1. Das Gerät muss feststehende oder versenkbare Drehknöpfe haben.
2. Die Drehknöpfe sind an der Vorderseite des Gerätes und von der Bedienblende abziehbar.
3. Die Einstellungen der Drehknöpfe sind auf den Knöpfen oder der Bedienblende aufgedruckt.

Um festzustellen, ob auch Ihr Elektrogerät umrüstbar ist, benötigen wir 7 Fotos des Gerätes:

1. Eine Aufnahme von dem Herd oder Backofen von vorne.
2. Wenn es sich um einen Herd handelt, benötigen wir ein Bild von dem Kochfeld.
3. Aufnahme von dem Drehknopf zur Temperatureinstellung. Auf dem Bild sollte die Temperaturskala zu sehen sein.



4. Aufnahme von dem Drehknopf einer Kochstelle. Auf dem Bild sollte die Beschriftung zu sehen sein.
5. Eine Aufnahme der Rückseite eines Drehknopfes, wenn er vom Herd abgezogen ist
6. Eine Aufnahme der Steckwelle oder Befestigung des Drehknopfes an der Bedienblende, wenn der Drehknopf abgezogen ist.
7. Eine Aufnahme des Typenschildes des Backofens (meist im Bereich der Backofentür).

Senden Sie uns die Fotos per E-Mail an: [hallo@feelware.eu](mailto:hallo@feelware.eu)

Wir melden uns kurzfristig zurück und teilen Ihnen mit, ob die Feelware Audio Nachrüstung auch an Ihr Gerät angepasst werden kann.

Beispiele für die benötigten Bilder finden Sie auf unserer Webseite in der Rubrik „Wissenswert“ im Artikel [„Kann Dein Herd sprechen lernen?“](#)

## Lieferumfang

Feelware Audio Bedienknöpfe in der benötigten Anzahl für Ihr Hausgerät, 1 Feelware AudioBox, 1 Netzteil für die AudioBox, hörbare Bedienungsanleitung auf CD, Installationsanleitung

## Informationen und Beratung

Weitere Informationen erhalten Sie unserem Feelware Service Telefon unter der Rufnummer +49 (0) 241 980 967 40. Unter der Rufnummer erreichen Sie auch unsere Experten für barrierefreie Haushaltsgeräte, die sie gern ausführlich beraten.

## Kostenübernahme

Die Feelware Audio Nachrüstung hilft Ihnen bei der selbstständigen Haushaltsführung und um Ihre täglichen Grundbedürfnisse zu decken. Die Feelware Audio Nachrüstung ist im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverband gelistet. Gerne beantragen wir das Hilfsmittel für Sie bei Ihrer Krankenkasse.

## Produktidentifikation

Bezeichnung: Feelware Audio Nachrüstung für Elektroherd / Backofen

Artikelnummer: AUD.00.REHE

GKV Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 07.99.04.7001

